

日々の機能訓練にお悩みの施設様に朗報 !!

介護テクノロジー利用の重点分野に 機能訓練支援機器も拡大されました*

*改訂後の重点分野に基づく事業は令和7年度以降に実施予定です



HAL腰タイプは効率的な
機能訓練を実施できます

HAL腰タイプ



< 製品のお問い合わせ・ご用命は >



CYBERDYNE 株式会社

茨城県つくば市学園南二丁目2番地1

TEL:029-855-3189

FAX:029-855-3181

<https://www.cyberdynne.jp>

HAL[®]腰タイプにより自立支援・重度化防止 要介護者様の機能訓練強化支援に活用!! iPadで装着者の情報を確認しながら簡単に操作可能


HAL腰タイプ



実施状況把握やアセスメントの支援



HALモニター

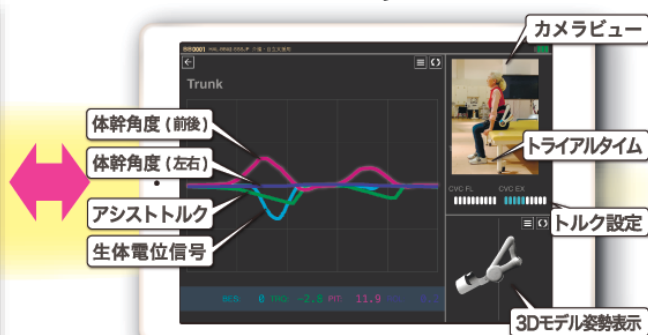


身体動作状況のリアルタイムモニタリング
訓練履歴の保存と参照などが可能



利用者様の“できる”を増やす! 機能訓練を次のレベルへ

“できる”を支えるHAL[®]の動作原理

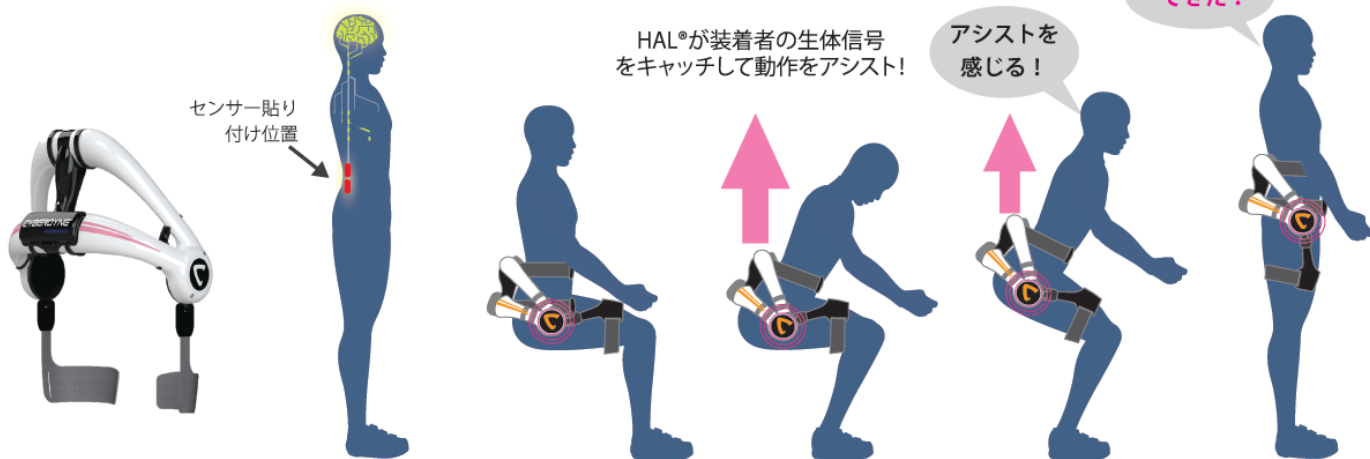

人の運動意思を反映した信号が脳から筋肉に伝達された際に、皮膚表面に漏れ出てくる微弱な生体信号をセンサーで検出。

センサーで検出された生体電位信号や姿勢などの情報に基づいて装着者の意思に従った動作を実現するための力を発生します。

パワーユニットを制御することにより腰部ベルトやカフを介して、上体を起こすアシストを行います。

腰部負担低減により立ち座り等の動作をアシストし、身体機能の維持向上を促進します。

科学×テクノロジーで、施設の機能訓練が進化!

HAL腰タイプによるシンプルな訓練プログラムで機能訓練の強化を支援

①骨盤前後傾

②体幹前後屈運動

③立ち座り

④スクワット

